

Procédure d'envoi et de mise en articulateur

Envoi

Afin de faciliter et d'optimiser le traitement de votre commande, veuillez à toujours utiliser la boîte Atlantis™ CaseSafe lors de l'envoi de cas chez Astra Tech. Selon le type de commande, il vous sera également nécessaire d'inclure certains éléments supplémentaires dans la boîte Atlantis™ CaseSafe.

Que doit-on inclure lors de l'envoi de cas Atlantis chez Astra Tech ?

Pour les cas comprenant 1 à 3 espaces édentés adjacents, inclure :

Le maître modèle articulé avec les analogues ou répliques d'implant en place
Le mordu d'occlusion (recommandé)
Un modèle avec une fausse gencive amovible (recommandé)

Pour les cas comprenant 4 (ou plus de 4) espaces édentés adjacents, inclure :

Le maître modèle articulé avec les analogues ou répliques d'implant en place
Le mordu d'occlusion (recommandé)
Un modèle avec une fausse gencive amovible (recommandé)
Un modèle amovible du montage prospectif des couronnes à réaliser.

Pour les cas de restauration d'une mâchoire complète, inclure :

Le maître modèle articulé avec les analogues ou répliques d'implant en place.
Une plaque base d'enregistrement ou un bourrelet d'occlusion (recommandé)
Un modèle avec de la fausse gencive amovible (recommandé)
Le montage complet prospectif amovible.



Remarque : Le matériel utilisé doit être désinfecté avant l'envoi.

Commander votre boîte Atlantis CaseSafe auprès de votre représentant Astra Tech

Articulateurs


Le point sensible de toute restauration définitive est la relation inter occlusale. Un bourrelet d'occlusion adéquat permet d'obtenir le meilleur résultat possible pour le patient.

Tous les cas doivent être articulés lorsqu'ils sont envoyés chez Astra Tech. Assurez vous du bon rapport occlusal entre les modèles maxillaires et mandibulaires. Pour des restaurations unitaires ou des restaurations simples, l'utilisation d'un articulateur simple en plastique ou en inox est possible.

Ceramco Vertex Articulateur en plastique fendu



Ray Foster Apex ou similaire Doit passer dans la boîte Atlantis™ Case Safe

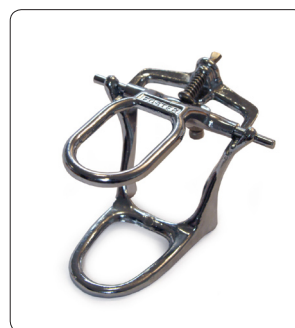

Dans le cas de restaurations importantes ou complexes, les articulateurs listés ci-dessous sont disponibles chez Astra Tech.

Remarques : Si vous utilisez l'un des articulateurs listés ci-dessous avec des disques de fixation amovibles, il ne vous est pas nécessaire d'envoyer l'articulateur au complet, mais simplement les modèles montés sur leur disque.

Considérations géométriques:

Pour rendre possible la fabrication d'un pilier Atlantis™, quelque soit le matériau sélectionné, un minimum de 6,0 mm d'espace intra-occlusal est requis. Pour permettre la fabrication d'un pilier Atlantis™ en zircone, une distance minimale de 2,5 mm est requise du centre de l'implant à la dent voisine (distance mésiale - distale).

Artex
Disques magnétiques



Denar
Disques magnétiques ou vissés




Dentatus
Disques vissés



Hanau
Disques vissés



Kavo Protar 3
Disques magnétiques

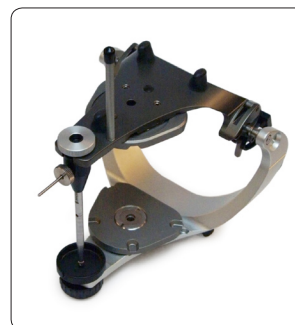

Panadent
Disques magnétiques



Sam 3
Disques magnétiques ou vissés



Stratus 200
Disques magnétiques ou vissés



Whip Mix
Disques vissés



Astra Tech France - 7, rue Eugène & Armand Peugeot, 92563 Rueil-Malmaison

N° Service Clients : 0821 20 01 01* - Fax Service Clients : 01 41 39 97 42 - Email : commande@astratech.com - www.astratechdental.fr

* 0,112 € TTC les 1 ères 56 secondes ; 0,090 € TTC la minute